

URO-TAINER



JAROSŁAW WAŃCZYK
AESCU LAP CHIFA KONCERN BBRAUN

Wytyczne EMEA i FDA

Prawie wszędzie w Polskich szpitala antybiotykiem pierwszego rzutu w leczeniu zakażenia układu moczowego (ZUM) jest cyprofloxacyna.

Zgodnie z wytycznymi EMEA (European Medicines Agency) oraz z FDA (Food and drug administration USA) **Ograniczenia ciprofloxacin!!!**

Wytyczne europejskie z 05.10.2018/11.03.2019 fluorochinolony nie stosować:

- w leczeniu zakażeń, które mogą ulec poprawie bez leczenia lub nie są poważne (takie jak zakażenie gardła)
 - w celu zapobiegania biegunce podróжного
- **nawracającym zakażeniom dolnych dróg moczowych (zakażenia moczu, które nie wykraczają poza pęcherz)**
- w leczeniu pacjentów, u których wcześniej wystąpiły poważne działania niepożądane antybiotykiem fluorochinolowym lub chinolowym
 - w leczeniu łagodnych lub średnio ciężkich zakażeń

Narastanie oporności w monoterapii w czasie 7 dniowej kuracji!!!

Działania niepożądane!!! (długotrwałe, poważne i prowadzące do niepełnosprawności)

Poniżej link do strony www opisujący zmiany w stosowaniu:

<https://www.ema.europa.eu/en/news/fluoroquinolone-quinolone-antibiotics-prac-recommends-new-restrictions-use-following-review> EMA/668915/2018

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/quinolone-fluoroquinolone-containing-medicinal-products> EMA/175398/2019

URO - TAINER

WSPOMAGANIE W LECZENIU INFЕКCJI układu moczowego szczepami wielolekoopornymi – system do płukania pęcherza moczowego



Uro-Tainer®



Zakażenia pęcherza moczowego są jednym z najczęstszych powikłań infekcyjnych. Jest to trudna do uniknięcia konsekwencja długookresowego cewnikowania.

Źródłem infekcji są zwykle bakterie bytujące w jelicie pacjenta lub też drobnoustroje środowiska szpitalnego.

SCHEMAT TERAPEUTYCZNY POSTĘPOWANIA W LECZENIU ZAKAŻEŃ PĘCHERZA MOCZOWEGO:

- 1. B. Braun Uro-Tainer Suby G (3,2%) lub Uro-Tainer Solutio R (6%) stosujemy naprzemiennie z Uro-Tainer PHMB.**
- 2. Płuczemy w równych odstępach czasowych.**
- 3. Maksymalna ilość użyć to dwa razy na dobę cytrynian, oraz dwa razy na dobę Uro-Tainer® PHMB.**
- 4. Przykładowy schemat to godzina 6:00 Uro-Tainer® Suby G, 12:00 Uro-Tainer PHMB, 18:00 Uro-Tainer® Suby G, 24:00 Uro-Tainer® PHMB.**
- 5. Pęcherz musi być wypełniony płynem zawierającym cytrynian przez 5-15 minut. Czas leczenia średnio 3 – 7 dni.**



DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ